

# Intraseal® SQ-EZI instructies



OPWARMEN VAN DE INJECTOREN IS NIET NODIG

Intraseal® SQ-EZI maakt een gemakkelijke en comfortabele toediening van de speenafsluiter mogelijk

## GEBRUIKSINSTRUCTIES



### Stap 1

Laad een nieuwe Intraseal® tube in de SQ-EZI applicator.



### Stap 2

Haak de applicator vast aan uw jas.



### Stap 3

Ontsmet het speenuiteinde met een nieuw tepeldoekje.




### Stap 4

Dien Intraseal® traag toe.



Probeer zo toe te dienen dat het product in het onderste deel van de speen blijft.

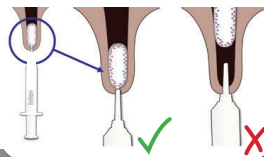

### Stap 5

Trek de tube terug uit de speen, verwijder de Intraseal® tube uit de SQ-EZI applicator. Laad de volgende Intraseal® tube in de SQ-EZI applicator vooraleer de volgende speen te reinigen en te ontsmetten.

